

# I-LID'N LASH PLUS -KÄYTTÖOHJEET

1. Pese kädet ja kasvat huolellisesti ennen I-LID'N LASH PLUS puhdistusliinan käyttöä. Pyyhi suljetut silmäluomet kostutetulla vanulapulla puhdistaksesi ihosi. I-LID'N LASH PLUS puhdistusliinaa voidaan käyttää myös meikin poistamiseen silmien ja kasvojen alueella.
2. Mikäli sinulla on herkät silmät, laita silmiisi I-DROP PUR- tai I-DROP PUR -gel - silmätippoja suojaamaan silmiäsi.
3. Avaa I-LID 'N LASH PLUS pakkaus ja ota yksi puhdistusliina. Sulje pakkaus tämän jälkeen tiiviisti.
4. Ennen kuin aloitat käyttämään I-LID 'N LASH PLUS puhdistusliinaa, niin sulje silmäluomesi kevyesti, vältä silmien siristämistä. Pidä silmät suljettuina koko puhdistuksen ajan.
5. Levitä puhdistusliinassa oleva geeli pyörivin liikkein, aloittaen ripsien tyvestä jatkaen ulospäin (kuva 1).
6. Puhdista tarvittaessa vielä silmäluomen reuna ja ripsien tyvi perusteellisemmin, vetämällä puhdistusliinalla lyhyitä vetoja silmäripsien suuntaan sekä pyyhkimällä ripsien tyvestä pois päin (kuva 2).
7. Ota tarvittaessa uusi I-LID 'N LASH PLUS puhdistusliina prosessin missä tahansa vaiheessa.
8. Anna puhdistusaineen pysyä silmän ympärillä ja luomen reunassa 30 sekunnista minuuttiin, pidä silmät koko ajan kevyesti suljettuina.
9. Toista vaiheet 2-8 toiselle silmälle.
10. Mikäli tunnet pistelyä iholla, huuhtelee silmät ja silmänympärysalue huolellisesti vedellä.
11. Toista tämä prosessi uudelleen puhtaalla liinalla, jos ripsien tyvi tai ripset eivät vielä puhdistuneet kunnolla.
12. Suorita tämä toimenpide kerran tai kahdesti päivässä vähintään neljän viikon ajan tai lääkärisi ohjeiden mukaan.

