

**SÄILÖNTÄAINEETON
VÄLITÖN, PITKÄVAIKUTTEINEN KOSTEUTUS
AKTIVOITUU SIMPÄNRÄPÄYKSESTÄ
0,30 % silmän räpäytyksestä aktivoituvaa hyaluronaania**

YLIVERTAINEN HELPOTTAVA VAIKUTUS



KÄYTTÖAIHEET

Silmien lievään, tuulesta, auringosta, vedestä tai muista ärsykeistä aiheutuvien epämukavuuden tai ärtymisen pitkäkestoiseen helpottamiseen. Käytetään voitelu- ja suoja-aineena torjumaan ärsytyksen lisääntymistä tai silmien kuivuuden torjuntaan. I-DROP® PUR GEL on käytettävä 12 kk kuluessa avaamisesta. Älä käytä vanhentumis päivän jälkeen (🕒).

KÄYTTÖOHJEET

Pese kädet ennen käyttöä. Älä käytä vanhentumis päivän jälkeen. Tiputa 1 pisara ärtyneeseen silmään/silmiin tarpeen mukaan. Katsoen peiliin vedä hellävaraisesti alempi silmäluomi alas ja tiputa 1 pisara luomen sisäpinnalle, tai tiputa 1 pisara suoraan sarveiskalvon alueelle nojaten taaksepäin kasvot ylöspäin. Annostelun jälkeen ravista pois mahdolliset jäämät pullon kärjestä ja kierrä korkki tiukasti kiinni. Säilytä viileässä, kuivassa ja puhtaassa paikassa.

KÄTTÖVINKKEJÄ

1. Käännä pullo ylösalaisin ja purista varovasti, kunnes pullon kärkeen muodostuu pisara. Tämä voi kestää muutaman sekunnin, sillä liuoksen on kuljettava yksisuuntaisen venttiilijärjestelmän läpi.
2. Kun tippa roikkuu pullon kärjestä, siirrä pullo varovasti silmän ylle ja purista hellävaraisesti kunnes pisara putoaa ärsyntyneeseen silmään.
3. Huomaa: Käytön jälkeen pullon kärjessä voi olla nestejäämiä. Se vahvistaa, että pullo toimii suunnitellusti, eikä neste imeydy takaisin pulloon.

Jos pullon kärjessä on käytön jälkeen nestejäämiä, poista ne nopeasti ravistamalla ja sulje korkki tiiviisti.

Tämä vaihe on kriittinen, jotta pullossa vielä oleva neste pysyisi steriilinä ja turvallisenä. Pienenpienikin nestepisara saattaa saastua, kun se altistuu ei-steriilille ympäristölle.

KOOSTUMUS

I-DROP® PUR GEL on steriili, säilöntäaineeton, silmiä räpäyttämällä aktivoituvaa voitelevaa silmätippa, ainesosat: injektioneesteisiin käytettävä vesi, natriumkloridi, natriumhyaluronaatti, glyseriini, natriumfosfaatti.

VAROITUKSET

Jos koet silmäkipua, näkökyvyn muutoksia, pysyvää silmien punoitusta tai ärsyntyä, tai jos tila pahenee tai kestää yli 72 tuntia, lopeta käyttö ja hakeudu lääkärin hoitoon.

I-DROP® PUR GEL saattaa muuttaa muiden silmiisi mahdollisesti käyttämäsi liuosten tai lääkkeiden vaikutusta. Tätä tuotetta ei ole testattu raskaina olevilla tai imettävillä. Älä annostele I-DROP® PUR GEL:iä tulehtuneeseen silmään.

Älä käytä koneita tai aja autoa heti käytön jälkeen. Välttääksesi saastumista älä kosketa pullon kärjellä mitään pintaa. Älä käytä tätä tuotetta, jos olet allerginen jollekin sen ainesosista. Sulje korkki käytön jälkeen. Pidä korkki tiukasti kiinni. Älä käytä yhdessä piilolinsien kanssa. Älä käytä, jos pullo vaikuttaa vahingoittuneelta tai siltä, että sitä on käytetty väärin.

PIDÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA.

TOIMITUSTAPA

I-DROP® PUR GEL toimitetaan 10 ml:n pullossa. Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut.



SÄILYTÄ 2 °C – 25 °C LÄMPÖTILASSA.
ÄLÄ KÄYTÄ VANHENTUMISPÄIVÄN JÄLKEEN (🕒).

Kehittäjä: Biocia Inc.

I-DROP® on I-MED Pharma Inc.:in rekisteröity tavaramerkki. ©2022 I-MED Pharma Inc.

Valmistettu Ranskassa, valmistuttaja:

I-MED PHARMA INC.
7190 Frederick Banting Rd.
St. Laurent, QC
Canada H4S 2A1
T (514) 685-8118
info@imedpharma.com

imedpharma.com

EC REP

ARAZY GROUP GmbH The Squire 12
Am Flughafen, 60549 Frankfurt
am Main Germany

CH REP

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland

MedEnvoy Switzerland
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

UK RESPONSIBLE PERSON: MEDES LIMITED
5 Beaumont Gate, Shenley Hill, Radlett,
Hertfordshire WD7 7AR, England, UK
medes@arazygroup.com